



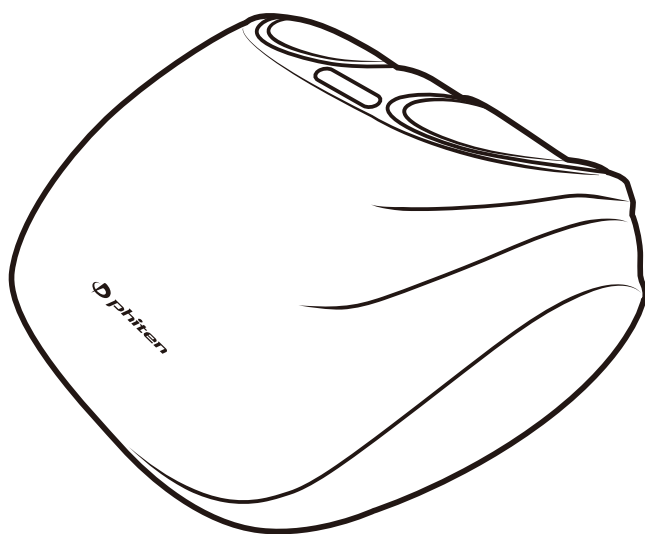

ファイテン 健光浴ソーラーチ

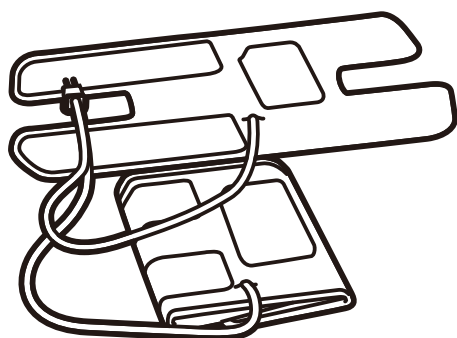

医療機器認証番号

302AKBZX00019A01

保管用

取扱説明書

保証書付

品番: **0424BE793000**

● 安全上のご注意	1 ～ 5
● 内容物と各部の名称	6
● ご使用方法	7
● ご使用方法（オーバーカバー）	8
● ご使用方法（エアーカフ）	9
● お手入れ・保管方法	10
● 使用目的または効果	10
● 動作原理	10
● 廃棄について	10
● こんな時は	11
● 定格・仕様	12
● 付属品及び消耗品のお買い求めについて	12
● アフターサービスについて	12
● 保証書	15
● 保証規定	15

お買い上げありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

この取扱説明書は大切に保管してください。保証書は「お買い上げ年月日、販売店名、お客様名」などの全てに記入し、必ずお確かめのうえ、お買い上げ店からお受け取りください。本製品を他の人に貸与や譲渡する場合は必ずこの取扱説明書もお付けください。

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店、もしくは発売元へお問い合わせください。



安全上のご注意

※本製品は家庭用です。

※ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

※各部に破損や亀裂、変形などの損傷がないことをよく点検してご使用ください。

※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

 警告	誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	 注意	誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性または、物的損害が発生する可能性が想定される内容を示します。
---	---	---	--

 禁止	記号は禁止の行為であることを告げるものです。	注意の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しています。必ずお守りください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。
 強制	記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。	

警告

 禁止	●次の人は使用しないでください。 ○医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓（塞栓）症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎及び皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など
	●意思表示が出来ない人や自分で操作できない人は使用しないでください。けがや事故の原因になります。
	●乳幼児やお子様に使わせないでください（乳幼児以外のお子様で、保護者または専門家の監督下で使用する場合を除く）。けがや事故のおそれがあります。
	●乳幼児やお子様に本製品のそばや上で遊ばせたり、上に乗らせないでください。けがや事故のおそれがあります。
	●交流 100V で使用してください。また、変圧器を用いて使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
	●電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。感電やショート、発火のおそれがあります。
	●電源コードは束ねたり、本体に巻きつけて使用しないでください。また、電源コードに重い物を載せたり、ねじったり、はさみ込んだりしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
	●本製品に足を入れたまま立ち上がったりしないでください。けがや事故の原因になります。
	●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに電源プラグを持って抜いてください。また濡れた手でプラグの抜き差しをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
	●本体布カバーを無理に引っ張ったり、ピンや針で突き刺したり、刃物で傷つけたりしないでください。けがや事故の原因になります。
	●本製品の分解、修理、改造は絶対に行わないでください。火災や感電、故障の原因になったり、けがや事故のおそれがあります。

⚠ 警告



強制

- 次の人は、必ず医師に相談のうえ、その指示に従ってください。
 - ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
 - 悪性腫瘍のある人 ○ 皮膚に創傷のある人 ○ 安静を必要とする人
 - 心臓に障害（狭心症、心筋梗塞など）のある人 ○ 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人
 - 糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害からくる知覚障害のある人
 - 体温 38℃以上（有熱期）の人
 - 例 1：急性炎症症状【けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期にある人
 - 例 2：衰弱している人
 - 骨粗しょう（鬆）症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性【とう（疼）痛性】疾患の人や骨の弱い人
 - けんしょう（腱鞘）炎の人 ○ その他医療機関で治療中の人
- ご使用前に縫製部分（本体布カバー、オーバーカバー、エアーカフ（専用オプション品））の点検をしてください。点検の結果、破れていたり、外れた状態では絶対に使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。
- 電源プラグは、確実に最後まで差し込んでください。事故や感電、ショート、発火のおそれがあります。
- 使用中に気分が悪くなったり刺激が強すぎて苦痛を感じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。
- 使用しても効果が現れない場合、医師または専門家に相談してください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。
- はじめは強さ表示（弱）で行い、長時間のご使用はおやめください。また、慣れてきてから強さ表示（中）・（強）に徐々に変更してください。体調不良やけがの原因になります。
- 本製品に故障が発見された場合は使用を直ちに中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、勝手に修理などはせず「販売店」または「発売元」のお客さま相談室に連絡してください。
- 浴室など湿度の高い場所や屋外で使用しないでください。また、本体に水などをこぼさないでください。感電や故障の原因になります。
- 電源コードが破損している場合は、ご自分で交換せず、「販売店」または「発売元」のお客さま相談室に連絡してください。

⚠ 注意



禁止

- 足以外の部位や物を挿入しないでください。また、エアーカフはけい部（首）、胸部に使用しないでください。けがをするおそれがあります。
- 本製品は家庭用マッサージ器です。
- 本製品は1人用です。2人以上での使用はしないでください。けがをするおそれがあります。
- 本体に直接素足を入れたり、また、エアーカフを素肌に直接あてて使用しないでください。けがの原因になります。
- 足に装身具、装飾品などをつけて使用しないでください。けがや故障の原因、装飾品などが破損するおそれがあります。
- 足のサイズが21cm未満の人は使用しないでください。足のサイズが大きい人は、強さを調節して使用してください。けがをするおそれがあります。
- ストッキングを着用したまま使用しないでください。ストッキングが破れるおそれがあります。
- 使用しながら眠らないでください。体調が悪くなったり、けがをするおそれがあります。
- 飲酒後や疲労が激しい時には使用しないでください。また食後すぐには使用しないでください。事故やけがをするおそれがあります。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 電源プラグを傷つけたり、ピンやごみ、水分を付着させないでください。感電やショート、発火のおそれがあります。
- ホットカーペットの上や暖房機器の近くなど高温になる場所では使用しないでください。火災や故障の原因になります。
- 他の治療器と同時に使用しないでください。機器の故障や誤動作を招くおそれがあります。
- 他の電気製品（テレビ、ラジオ、オーディオ機器、電話、FAX など）に近づけて使用しないでください。電気製品に悪影響を与える原因となることがあります。
- 本製品を使用しながら、あるいは本製品の近くで、携帯電話を使用しないでください。機器が誤動作するおそれがあります。
- キャスター付きの椅子や回転機能が付いた椅子に座って使用しないでください。転倒によるけがや事故、故障の原因になります。
- ほこりの多い場所や毛足の長い絨毯などの上で使用しないでください。感電やショート、発火のおそれがあります。
- マッサージ中に電源プラグを抜かないでください。事故やけがのおそれがあります。
- 足のマッサージ以外の目的で使用しないでください。事故やけが、故障の原因になります。
- 手などを入れて使用しないでください。事故やけがのおそれがあります。

⚠ 注意

 禁止	●本製品が動作中に足を出し入れしないでください。けがのおそれがあります。
	●電源コードを持って本体を持ち上げたり、電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
	●布団や毛布などをかぶせて使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
	●本製品の上に立ったり、不安定な姿勢や無理な体勢で使用しないでください。事故やけがの原因になります。
	●エアバッグに故意に力を加えたり、尖ったもので傷つけたり、膨らんだ状態のエアバッグを踏みつけたりしないでください。事故やけが、故障の原因になります。
	●本体を立てて保管しないでください。けがや故障の原因になります。
 強制	●スイッチ、タイマーなどが正常で安全に動作するか確認の上、使用してください。感電やけがのおそれがあります。
	●定められた使用時間を越えないようにしてください。体調不良の原因になります。 ○1回の使用時間は7分～15分位（各コースによる。P7 参照）が効果的です。 ○続けて使用する場合は30分以上時間を空けてください。1日あたりの使用時間は通算して30分以内としてください。長時間のご使用はお控えください。
	●本体布カバー及びオーバーカバー部分に異物がついていないことを確認してください。ファスナーが開いていないことを確認して使用してください。事故やけがのおそれがあります。
	●足入れ部内に異物が入っていないことを確認してください。事故やけがのおそれがあります。
	●本体は床面の水平な場所に置いて使用してください。事故やけがのおそれがあります。
	●指定の付属品（オーバーカバー）を使用してください（出荷時には取付済）。事故やけが、故障の原因になります。
	●長期間ご使用にならなかった場合、本製品の動作、付属品の状態を確認のうえ、ご使用ください。
	●電源プラグは容易に外れないよう、正しく確実に接続してください。ショートや発火の恐れがあります。
	●本製品の内部に水が入らないようにしてください。火災や感電、故障の原因になります。
	●使用中電源コードが体に巻きつかないように注意してください。事故やけがの原因になります。
	●本製品に異常を感じたり、停電などを含む緊急時には、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。事故やけがのおそれがあります。
	●刺激が強すぎると感じた場合は、一度電源を切り、強さ表示（弱）に変更したり、または厚手の靴下などを履いて使用してください。けがのおそれがあります。
	●必ずオーバーカバーを取り付けて使用してください（P8 参照）。事故やけがのおそれがあります。

⚠ 注意



 強制

●身体に異常を感じた場合は、使用を直ちに中止してください。事故やけがのおそれがあります。

●本製品の使用によって発疹、発赤、かゆみ、痛み、腫れなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。健康をそこなうおそれがあります。

●使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源コードは、ねじれをまっすぐに直して保管してください。ホコリや湿気による絶縁の劣化から、漏電火災の原因になります。


●持ち運ぶ時は、本体底面の両側をしっかり持って運んでください。けがや故障の原因になります。

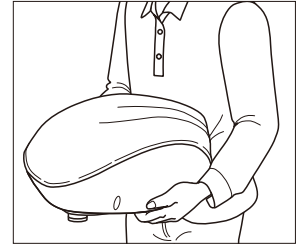


●本製品、付属品などは衛生的に保つための洗浄について本取扱説明書の「お手入れ・保管方法」(P10)を参照してください。

内容物と各部の名称

＜本体＞

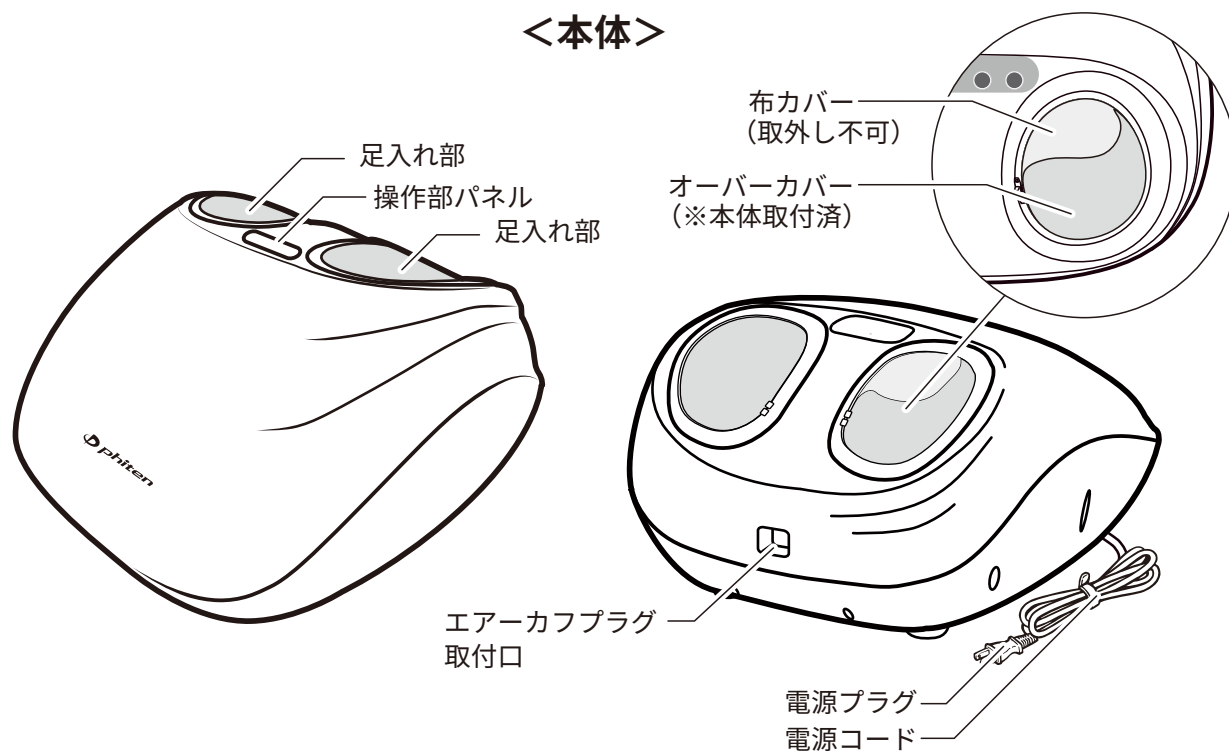


＜操作部パネル＞

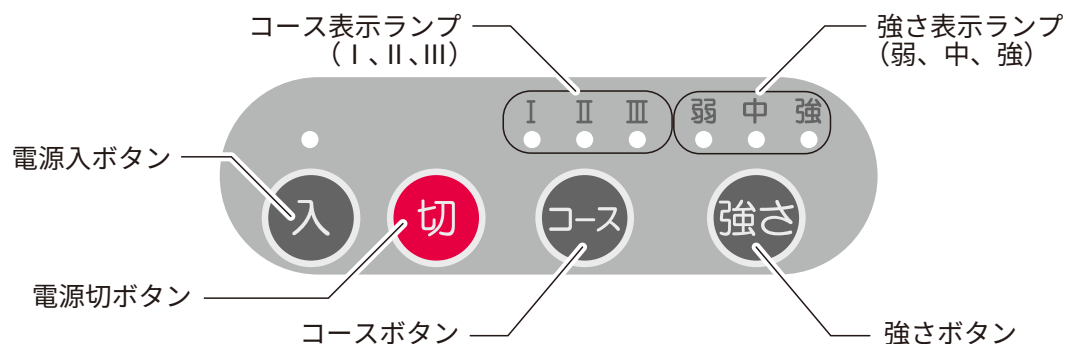

＜付属品＞

オーバーカバー (左右セット)
※本体取付済


取扱説明書
(本書)

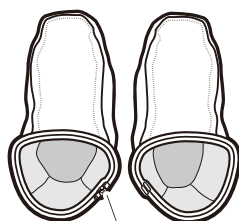

左足用 右足用
スライドファスナー

＜専用オプション品＞

ファイテン 健光浴ソーラーチ エアークフ
(別売品)

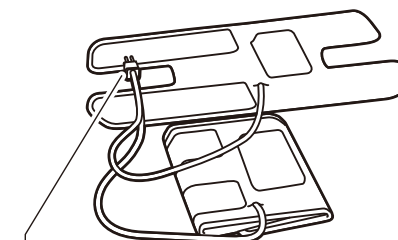


エアークフプラグ

ご使用方法

- 1 電源プラグを交流100Vのコンセントに差し込みます。

ご注意

※感電するおそれがありますので、濡れた手で差込まないでください。

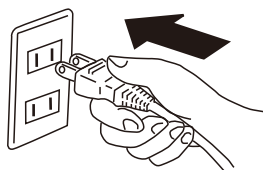


- 2 椅子などに座り、足入れ部から足を入れます。

ご注意

※右図以外の向きに足を入れないでください。
※足を入れる時に動作していないことをご確認ください。




- 3 足の中心付近（下イラスト参照）に本体の足裏突起が合うように足を移動させてください。

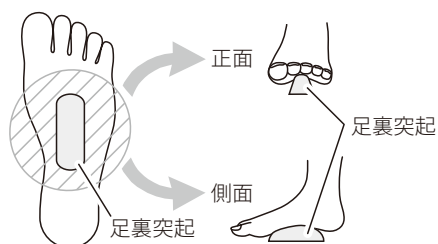

- 4 操作部パネルの「入」ボタンを押します。

- 電源ランプが「切」を示す赤色点灯から緑色点灯に変わります。
- コース「Ⅰ」強さ「弱」でマッサージがスタートします。

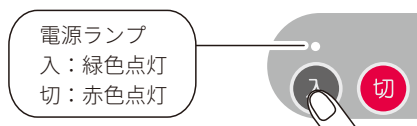

- 5 お好みにより「コース」ボタン、「強さ」ボタンを押して動作を選択してください。

注意

- はじめは強さ表示（弱）で行ってください。
- 刺激が強すぎて苦痛を感じた場合、直ちに使用を中止してください。
- 定められた使用時間を越えないようにしてください。
体調不良の原因になります。
- 1回の使用時間は7分～15分位（各コースによる）が効果的です。
- 続けて使用する場合は30分以上時間を空けてください。1日あたりの使用時間は通算して30分以内としてください。長時間のご使用はお控えください。

コースⅠ		コースⅡ		コースⅢ	
横アーチコース	約 7 分	縦アーチコース	約 7 分	ミックスコース	約 10 分
コース表示ランプ — Ⅰ Ⅱ Ⅲ コースボタン — コース		コース表示ランプ — Ⅰ Ⅱ Ⅲ コースボタン — コース		コース表示ランプ — Ⅰ Ⅱ Ⅲ コースボタン — コース	
強さ 弱		強さ 中		強さ 強	
強さ表示ランプ — 弱 中 強 強さボタン — 強さ		強さ表示ランプ — 弱 中 強 強さボタン — 強さ		強さ表示ランプ — 弱 中 強 強さボタン — 強さ	

- コースは、効果的な動作を組み合わせた自動プログラムです。押すたびに3種類のコースが切り替わります。
- オートタイマーにより、マッサージは自動的に終了します。途中でコースを変更した場合でも、タイマーが連続最長15分のため、コース内容により15分以内に自動停止することもあります。
- ボタンを押すたびにコース、強さが変わります。
- 振動や動作音が気になる場合は、マットなどを本体の下に敷くと軽減されます。

- 6 途中で動作を止めたい時は「切」ボタンを押してください。

ご使用方法（オーバーカバー）



強制

- 必ずオーバーカバーを取り付けて使用してください。
- 面ファスナーは、正しい方向で奥に付けてください。
- オーバーカバーは消耗品です。破れなどが発生した場合は「販売店」または「発売元」のお客様相談室に連絡し、直ちに新品と交換（有料）してください。


取り付け方

※出荷時には、本体にオーバーカバーが左右それぞれ取り付けられています。


- 1** 動作が停止していることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いて作業してください。

ご注意


※感電するおそれがありますので、濡れた手で触れないでください。

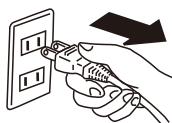


- 2** オーバーカバーには左足用、右足用があります。

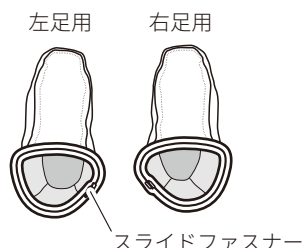


- 3** 面ファスナーを下にして手を入れてください。

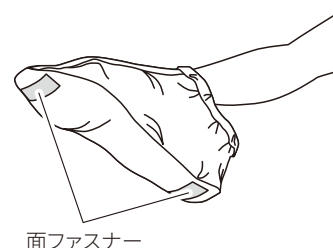

- 4** 手をなるべく奥まで差し込み、つま先部とかかと部の面ファスナーを本体布カバーに貼り付け固定します。

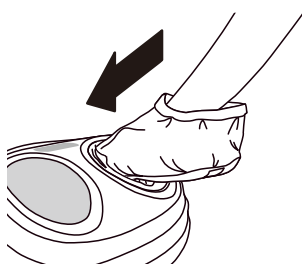


- 5** 本体布カバーとオーバーカバーのスライドファスナーを合わせ、ゆっくり閉めます。スライドファスナーは、最後まで確実に閉めてください。

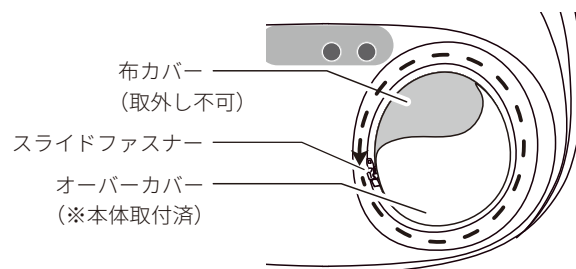

取り外し方

- スライドファスナーを外し、面ファスナーを外してから、オーバーカバーを引き抜いてください。

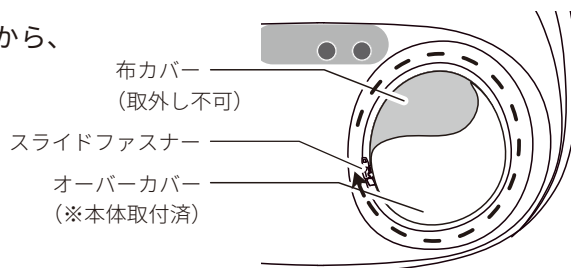


お手入れ

- オーバーカバーは、ご家庭での洗濯（またはドライクリーニング）が可能です。

ご注意

洗濯をする際は、オーバーカバーの面ファスナーで他の衣類を傷つけないよう、右図のように面ファスナーが内側になるようにファスナーを取り付けてください。オーバーカバーが袋状になるようにして洗濯してください。

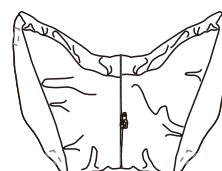

ご使用方法（エアーカフ）

 禁止	●ふくらはぎ、ふともも以外の部位に使用しないでください。 ●けい部（首）、胸部には使用しないでください。 ●エアーカフはファイテン 健光浴ソーラチ専用オプション品です。他の機器への接続はしないでください。 ●装着したまま、立ったり歩いたりしないでください。
 強制	●ご使用前に縫製部分の点検をしてください。ほつれや破れた状態では絶対に使用しないでください。 ●装着部位に合わせて巻き付けてください。きつく巻きすぎるとうっ血するおそれがあります。最初はゆるめに巻き、刺激に慣れてから巻き方を調節してください。 ●装着前にエアーカフ装着面または肌面に異物が付着していないこと、衣類のポケットなどに物が入っていないことを確認してください。 ●はじめは強さ表示（弱）で行ってください。 ●ホースが体に巻き付かないように注意してください。


取り付け方と外し方

※本品は別売品です。お買い求めの場合は「販売店」または「発売元」のお客様相談室へご相談ください。

- 1** 動作が停止していることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いて作業してください。

ご注意


※感電するおそれがありますので、濡れた手で触れないでください。

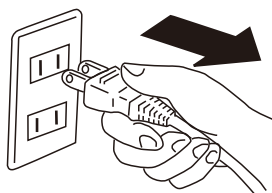

- 2** エアーカフのホース先端にあるエアーカフプラグを本体背面のエアーカフプラグ取付口に差し込んでください。

ご注意


エアーカフプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。

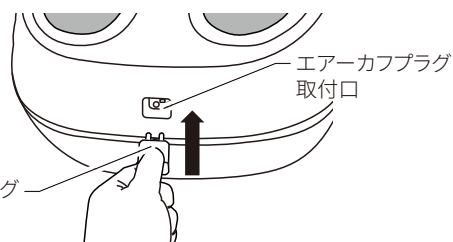

- 3** 装着部位にエアーカフを巻き付け、面ファスナーで固定してください。

ご注意


エアーカフは最初はゆるめに巻いてください。

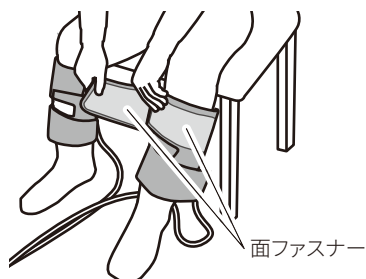


- 4** 本体の操作部パネルの「入」ボタンで本体とエアーカフが動作を開始します。

ご注意

はじめは強さ表示（弱）で行ってください。

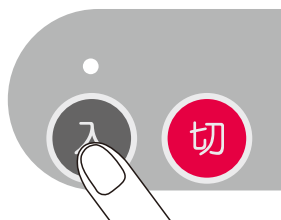

- 5** 取り外す時は、エアーカフプラグを持って本体から引き抜いてください。

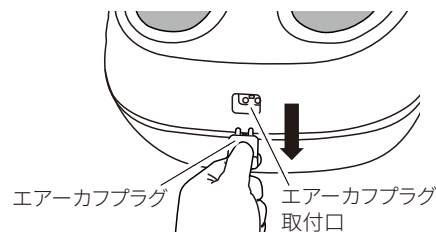

お手入れ

- ご家庭での洗濯やドライクリーニングはできません。ぬるま湯か石鹸水を含ませ、よく絞った柔らかい布で拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン、漂白剤は使用しないでください。破損や変色の原因となります。
- エアーカフプラグ及び健光浴ソーラチ本体のエアーカフプラグ取付口のほこりなどは定期的に取り除いてください。

お手入れ・保管方法



禁止

●お手入れに台所用中性洗剤以外は使用しないでください。塩素系 / アルカリ系の洗剤や、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しないでください。変質したり、塗料がはがれたりすることがあります。



強制

●お手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります。

●入浴剤（特にイオウ成分を含んだもの）やシャンプー、整髪料などが生地に着した時は速やかに拭き取ってください。

●電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。

●エアーカフプラグ取付口のほこりなどは定期的にとってください。

●本体布カバーは外すことができません。本体の汚れは水に浸し、よく絞った柔らかい布で拭き取ってください。

●乳幼児やお子様の手の届かない場所に保管してください。

●本体及び付属品などは次回の使用の際に支障のないよう清潔に保ち、湿気、ほこりの少ない場所に整理、保管してください。

●直射日光が当たる場所や、ストーブなどの近くで高温になる場所は避けてください。


●長期間使用しなかった機器を使用する時は、使用前に機器が正常、かつ安全に動作する事を確認してください。

h


1 動作が停止していることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いて作業してください。

ご注意

※感電するおそれがありますので、濡れた手で触れないでください。

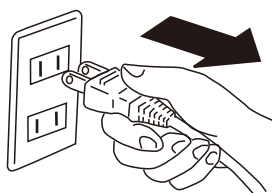

2 水に浸しよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。汚れが気になる場合はぬるま湯または薄めた台所用洗剤を柔らかい布に浸し、よく絞ってから本体表面の汚れを拭き取り、さらに乾いた布で仕上げてください。

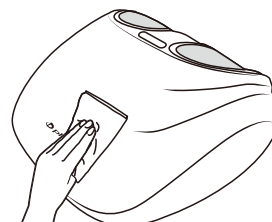

使用目的または効果

●あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する事。

疲労回復

血行をよくする

筋肉の疲れをとる

筋肉のこりをほぐす

神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

動作原理

●本体には、モーターポンプ、バルブ、バイブモーター、制御機器が内蔵されており、モーターポンプでエアーを送り込み、エアーバッグを収縮・拡張させることによりマッサージを行う。

●バイブモーターからの回転出力を踵部ボードに伝達して振動させマッサージを行う。

廃棄について

●製品の寿命などにより本製品及び付属品を廃棄する場合は、環境への影響を少なくするため、お住まいの自治体のゴミ収集方法に従って処分してください。

こんな時は

症 状	考えられる原因	処 置	
動作しない。	電源プラグが正しく差し込まれていない。	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。	それでも直らない時は 直ちに使用中止 事故防止のため、必ずお買い求めの販売店、もしくは発売元に、点検修理を依頼してください。
途中で止まる。	オートタイマーが起動している。	電源「入」ボタンを押して運転を開始してください。	
本体のエアの強さを感じない。	空気が入っていない。		
動作が終了したのに本体またはエアーカフ（専用オプション品）から足が抜けない。	本体またはエアーカフ（専用オプション品）からエアが排気されていない。	電源「切」ボタンを長押しし、空気を抜いてください。空気が抜けてから、ゆっくり足を抜いてください。それでも空気が抜けない場合は電源プラグを抜いてください。本製品の使用を止め、「販売店」または「発売元」のお客さま相談室にご相談ください。	
オーバーカバーが破れている。		ただちに使用を中止し、お買い求めの「販売店」または「発売元」で新しいオーバーカバーをお買い求めください。	
エアーカフの強さを感じない。	エアーカフプラグが正しく差し込まれていない。	エアーカフプラグをエアーカフプラグ取付口にしっかりと奥まで差し込んでください。	
その他異常がある。		本製品の使用を止め、「販売店」または「発売元」のお客さま相談室にご相談ください。	

定格・仕様


医療機器の区分	管理医療機器
類別	機械器具（77）バイブレーター
一般的名称	家庭用電気マッサージ器（JMDN コード 34662000）
販売名	ファイテン 健光浴ソラーチ
医療機器製造販売認証番号	302AKBZX00019A01
品番	0424BE793000
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	35W 回 ^{*1}
定格時間	30 分
振動回転数	300~1500 回 / 分
エア圧力	90kPa 以下
タイマー	コースⅠ：7 分、コースⅡ：7 分、コースⅢ：10 分 連続最長 15 分
素材	張地：ポリエステル 操作部プレート、ケース：ABS
本体重量	（約）6.2kg
本体寸法	サイズ：縦（約）40cm× 横（約）43cm× 高さ（約）24cm
電気的安全性	電気用品安全法技術基準適合確認済
製造販売元	株式会社 BHS 静岡県藤枝市八幡 550 番 1 054-644-4120
製造元	シアメン コンフォートサイエンス & テクノロジー グループ チャイナ XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD., CHINA

製品の仕様及びデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。


*1：2重絶縁構造を表します。

付属品及び消耗品のお買い求めについて

消耗品（オーバーカバー）、専用オプション品（エアークフ）のお買い求めは、お買い上げの「販売店」または「発売元」のお客様相談室へお問い合わせください。

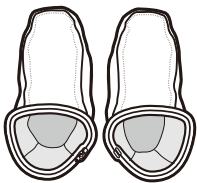

ファイテン 健光浴ソラーチ
オーバーカバー（左右セット）
品番：0424BE793001

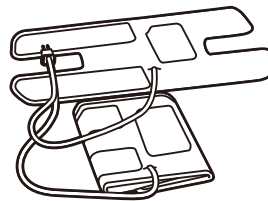

ファイテン 健光浴ソラーチ
エアークフ
品番：0424BE793002

アフターサービスについて

補修用性能部品の保有期間

当社では、本製品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後 2 年としております。

発売元

ファイテン株式会社

京都市中京区烏丸通錦小路角
手洗水町678番地

お客様相談室

 **0120-510-702**

午前10時～午後5時（土・日・祝日を除く）

URL

<https://www.phiten.com/>

MADE IN CHINA

MEMO

MEMO

保証書

このたびは、ファイテン 健光浴ソーラーチをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は厳重な検査を行い品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一不具合が発生しました場合、保証規定によりお買い上げ日より1年間は無償修理いたします。

※本製品の保証は、日本国内でご使用になる場合に限りです。

This warranty is valid only in Japan

販売店記入欄	品番	0424BE793000	保証期間	お買い上げ日より1年間
	お買い上げ年月日※			
	販売店名※			
	住所 電話番号			

※販売店様へ：この保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。

必ずお買い上げ年月日、販売店名、住所、電話番号をご記入のうえ、お客様へお渡しください。

お客様記入欄	ご住所	フリガナ 〒		
	お名前	フリガナ	お電話番号	

お客様相談室	 0120-510-702 午前 10 時～午後 5 時（土・日・祝日を除く）	製造番号	
--------	---	------	--

保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理いたします。
- 本体が保証対象となります。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、本製品に本書を添えてお買い求めの「販売店」もしくは「発売元」のお客様相談室にご依頼ください。修理費、送料共に無償で対応いたします。なお保証期間を過ぎたものについての修理費、送料はお客様のご負担をお願いいたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送などによる故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変並びに公害や異常電圧、その他の外部要因による故障及び損傷。
 - 本書のご提示が無い場合。
 - 本書の全てに記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
 - 消耗部品（オーバーカバー）の交換など。
 - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間や条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについては有償といたします。
- 保証書に記載された個人情報、対象製品の保守サービスや安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。